

Lingettes nettoyantes désinfectantes

Pour mains, surfaces et objets

ASEPTONET (TMA018)



Conditionnement

Format de lingette : 130 x 200mm
Boîte de 100 lingettes
Carton de 12 boîtes

Composition

Contient notamment :
Chlorure de benzalkonium, Trideceth -7, Ethanol, Isopropanol.
Moins de 5% d'agents de surface non ionique.
Parfum dont limonène

Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté (sauf *)

- Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
- Bactéricide EN1500 en 1 mn.
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348 et EN14563 en 15mn.
- Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697, EN14562* en 5 min.
- Levuricide sur Candida albicans : EN1275, EN1650, EN13697, EN13624*, EN14562* en 5 min.
- Virucide* EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min, Coronavirus, Influenza A (H1N1), HBC, HCV, Adenovirus, VRS, Polyomavirus, Norovirus en 1 min, Rotavirus en 15mn.

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.

Mode d'emploi

Lingettes prêtes à l'emploi à usage unique.
Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité. Insérer ensuite la lingette centrale à l'intérieur du capot. Passer la lingette sur le matériel à nettoyer et désinfecter.
Bien refermer le couvercle après utilisation. Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.
Action dans les 5 minutes après le passage de la lingette.

Précautions d'emploi

Eviter le contact avec une peau irritée, une plaie ou les muqueuses.
Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Réf : TMA018 - Code formule 998 077

Fiche Technique. Version 3- 02/2014

STERIDIS -

Distribué par TIXO

ZAC des Entrepôts - 10 rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - Fax : 03 23 53 31 39

email : tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - WWW.tixo-nga.fr